

## Stručné instrukce k odběru krve

Odběr krve provádí veterinární lékař!

Krev odebírejte nesrážlivě do EDTA zkumavek (K2 nebo K3).

Dostačující množství je 0,5 ml až 1 ml krve.

Zkumavkou zatřeste, aby se krev dobře promísila s antikoagulantem.

Zkumavku označte jednoznačnou identifikací vyšetřovaného zvířete (číslem vzorku, pokud Vám bylo přiděleno; jménem zvířete; čipem...).

Krev uchovávejte v lednici. Odešlete krev co nejdříve po odběru.

## Stručné instrukce k odesílání vzorku krve

Zkumavku zabalte do ubrousku - zajistíte ji tak proti nárazu, aby nemohlo dojít k jejímu rozbití. Zkumavku pak vložte do igelitového sáčku, sáček uzavřete.

Sáček označte jednoznačnou identifikací vyšetřovaného zvířete (číslem vzorku, pokud Vám bylo přiděleno; jménem zvířete; čipem...).

Zabalenu zkumavku vložte do bublinkové obálky a odešlete běžnou poštou na adresu laboratoře:

**Genomia s.r.o., Janáčkova 51, 323 00 Plzeň, Česká republika**

## Objednání odběrky

Můžete si v laboratoři Genomia objednat zaslání odběrové soupravy na krev. Objednávat můžete online (objednávkový systém Vám přidělí číslo vzorku, které můžete používat pro jednoznačnou identifikaci vyšetřovaného jedince), emailem nebo telefonicky. Veterinární lékař provede odběr do poskytnuté zkumavky. Souprava dodávaná Genomia obsahuje:

- sterilní zkumavku s látkou zamezující krevnímu srážení (EDTA)
- uzavíratelný sáček označený štítkem
- bublinkovou obálku se zpáteční adresou

**Upozornění:** Chovatelské organizace mohou mít specifické požadavky na odběr vzorků. Odběr vzorku bez potvrzení identity jedince nezávislou autoritou nemusí být chovatelskou organizací uznáný.